

## SILENT KNIGHT® Tablettenzerkleinerer



Mit dem SILENT KNIGHT® – Tablettenmörser können Tabletten leicht, schnell und hygienisch einwandfrei zerkleinert werden. Ohne großen Kraftaufwand werden die Tabletten fast geräuschlos zu einem gebrauchsfertigen Pulver verarbeitet. Der Mörser und die speziell entwickelten, patentierten Beutel bilden ein aufeinander abgestimmtes System. Für noch mehr Effizienz, Komfort und Schutz sind die SILENT KNIGHT® – Beutel so verstärkt, dass sie auch unter großem Druck nicht reißen oder durchlöchert werden. Dies ist wichtig, damit Kreuzkontaminationen verhindert werden. Die Beutel

verfügen am Boden und an der Öffnung über eine Wölbung. Somit können die Tabletten (Zerkleinerung mehrerer Tabletten gleichzeitig möglich) leichter eingefüllt und nach der Zerkleinerung wieder vollständig entleert werden. Damit wird gewährleistet, dass dem Patienten die richtige Dosierung zugeführt werden kann. Die fein pulverisierte Tablette ist für eine Sondenernährung geeignet.

Der SILENT KNIGHT® ist einfach in der Anwendung und benötigt nur minimalen Kraftaufwand.

Eine aus der Nanotechnologie stammende antimikrobielle Beschichtung aus OxiTitan weist Bakterien, Viren, Schimmel und Pilze zuverlässig ab und stellt somit einen optimalen und hochmodernen Hygieneschutz dar. Die Reinigung des SILENT KNIGHT® erfolgt mit konventionellen Desinfektionsmitteln oder einfach nur mit Wasser.

### WICHTIGE HINWEISE

Nicht alle Tabletten dürfen einer Zerkleinerung unterzogen werden. Dazu gehören z.B. magensaftresistente Tabletten, Kapseln mit Depotwirkung, Sublingualtabletten, ect. Deshalb sollten ohne Zustimmung des Apothekers oder die ausdrückliche schriftliche Anordnung des Arztes, Tabletten nicht pulverisiert werden. Auf keinen Fall dürfen Tabletten in Blistern oder anderen nicht geeigneten Behältnissen mit dem SILENT KNIGHT® zerkleinert werden.

### ANWENDUNG

1. Einfüllen der Tabletten in den **SILENT KNIGHT®** - Beutel
2. Anheben des Griffes und einlegen des Beutels zwischen die Mörserplatten
3. Griff nach unten drücken, ggf. den Vorgang wiederholen
4. **SILENT KNIGHT®** - Beutel mit gebrauchsfähigem Pulver entnehmen.

### BESTELLINFORMATIONEN

SILENT KNIGHT® Tablettenzerkleinerer  
inkl. 50 Beutel.

Artikelnummer: **NONSK0100**

Ersatzbeutel, latexfrei, 1000 Stk. / Karton  
Artikelnummer: **NONPC1000**